

Żel przewodzący **Go Gel**



Do stosowania przy elektrostymulacji mięśni dna miednicy mniejszej oraz dla poprawy komfortu współżycia seksualnego.

Kod produktu: **K-GO50** (50ml) i **K-GO100** (100ml)





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Go Gel, to sterylny żel na bazie wodnej, który działa jako przyjemny lubrykant, komfortowy i naturalny w odczuciach. Może być stosowany z lateksowymi prezerwatywami.

- Nie jest środkiem antykoncepcyjnym.
- Sterylizowany promieniowaniem gamma.
- Przezroczysty, bez substancji tłustych i kleistych.
- Nie podrażnia skóry i błon śluzowych.
- Zalecany w ginekologii, przy lubrykacji chirurgicznej i innych lubrykacjach przezpochwowych.
- Odpowiedni do elektroterapii, wziernikowania i badań diagnostycznych.
- Lepki i szybko rozsmarowuje się na powierzchniach.
- Nie niszczy części gumowych i metalowych oraz materiałów tekstylnych i naturalnych.
- Product medyczny przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta.
- Skład: woda, PEG-200, metyloparaben, propyloparaben, carbomer, wodorotlenek sodu, gliceryna.

! **Ostrzeżenia:** W przypadku wystąpienia podrażnień, przestań stosować żel i skonsultuj to z lekarzem. Żel nie zawiera środków plemnikobójczych. Przechowuj w temperaturze pokojowej. Trzymaj z dala od dzieci.

Sposób stosowania: stosuj i rozprowadzaj na skórze, prezerwatywie lub sondzie dopochwowej.

<p>Wytwórca:</p>  <p>Nantong Health & Beyond Hygienic Products Inc. No.118 Yuxian road, North Town Street Rugao, Jiangsu 226575 CHINY</p>	<p>Import/dystrybucja w Polsce:</p> <p>AP Plan Sp.J. ul.Wolności 13M lokal 102, 64-130 Rydzyna TEL: 65 619 3855 Sklep diaMedica www.diamedica.pl</p> 
<p>Autoryzowany przedstawiciel:</p> <p>Luxus Lebenswelt GmbH Kochstr. 1, 47877, Willich NIEMCY</p> <p> 0120</p>	<p>Wyprodukowano dla (serwis):</p> <p>TensCare Ltd. 9 Blenheim Road Epsom Surrey KT19 9BE, Wielka Brytania Tel: +44(0) 1372 723434</p> 

Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-21